

3M Sağlık Ürünleri
Cildi korur - Yaraları iyileştirir



Bakterileri hedef alan Yara Örtüsü

Bakterilere karşı geniş spektrumlu etki



3M™ Tegaderm Alginate Ag
Gümüş Aljinat Örtü

Kolay. Etkili. Güvenli.



3M™ Tegaderm™ Alginate Ag

Gümüş Aljinat Örtü

3M™ Tegaderm™ Alginate Ag kalsiyum aljinat, karboksimetilselüloz ve iyonik gümüş kompleksinde (Gümüş Sodyum Hidrojen Zirkonyum Fosfat) oluşan antimikrobiyal, yüksek derecede emici ped ve şerit formları bulunan steril yara örtüsüdür. Örtü yara eksüdası ile temas ettiğinde, mikroorganizmalara karşı geniş spektrumlu etkisi sayesinde mikrobiyal yükü oldukça etkili şekilde azaltan antimikrobiyal iyonik gümüş, yara içerisinde serbest kalır.



- Antibiyotik dirençli bakterileri de (MRSA ve VRE) kapsayan, mikroorganizmaların geniş spektrumuna karşı antibakteriyal etki sağlar
- Yüksek emicilik gücü ile yüksek örtü bütünlüğünü birlikte sağlar
- Mikrobiyal kontaminasyona karşı etkili bariyer sağlar
- Otolitik debridman gerektiren yaralarda dahi kullanılabilir

emici &
antimi

Endikasyonları

- Tegaderm™ Alginate Ag örtü yarayı doldurmada ya da yüksek enfeksiyon riski taşıyan yaraların tedavisinde birincil örtü olarak kullanılabilir. Sağlık profesyonelinin gözetimi altında enfekte yaralarda da kullanılabilir.
- Tegaderm™ Alginate Ag örtünün amaçlanan kullanım alanı aşağıdaki yaraları kapsayan kısmi ya da tam kalınlıktaki orta-yüksek eksüdalı yaralardır:
 - Bacak ülserleri
 - Bası ülserleri
 - Diyabetik ülserler
 - Derin kaviteli yaralar
 - Travma yaraları (kesilerler, abrazyonlar)
 - Postoperatif yaralar
 - Donör alanlar
 - Yüzeyel kısmi kalınlıktaki yanıklar

Uygulama



Tegaderm Alginate Ag örtü steril makas ile kesilebilir ya da katlanarak yara alanı doldurulabilir. Örtüyü direkt olarak yara yatağına uygulayın. Derin yaralarda yarayı gevşekçe doldurun. Örtünün, yarayı çevreleyen cildi de kaplamadığından emin olun. Tegaderm Alginate Ag örtüyü oklüzif (kapatıcı) olmayan bir örtü ile kaplayın



Tegaderm Alginate Ag yara üzerinde 7 güne kadar kalabilir. Örtü değiştirme sıklığı yaranın kondisyonuna ve eksüda miktarına göre değişmektedir. Örtü yaradan tek parça halinde kolaylıkla çıkarılabilir. Herhangi bir fiberin yarada kalması durumunda, hafif bir irigasyon ile yaradan çıkarılması sağlanabilir.

Dikkat

Enfekte yaralarda, sağlık profesyonelinin gözetimi altında ve kapsamlı bir tedavi planı dahilinde kullanılmalıdır.

Sipariş Bilgileri

Kod numarası	Boyutlar	Paketleme (adet/kutu)
90310	5 x 5 cm	10
90312	10 x 10 cm	10
90314	10 x 20 cm	10
90316	15 x 15 cm	10
90320	Şerit 3 x 30 cm	10

3M™ Tegaderm™ Örtü KOLAY. ETKİLİ. GÜVENLİ.



3M Türkiye

Şehit Eroğlu Cad.

Akel İş Merkezi

No:6, A Blok 34805 Kavacık

Beykoz / İstanbul - Türkiye

Tel +90 (0) 216 538 07 77

Fax +90 (0) 216 538 07 99

İnternet www.3M.com.tr

3M ve Tegaderm, 3M firmalarının tescilli markalarıdır.
© 3M 2008. Tüm hakları saklıdır.